



eB-G

# Käyttöohje

Verensokerimittari

Malli eB-G



# JOHDANTO

Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuottemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta käytetään ja niitä tulee noudattaa tarkasti. Jos näitä ohjeita ei noudateta se voi johtaa väärin mittaustuloksiin, laitevahinkoihin tai henkilövahinkoihin.

Ohjekirja on julkaistu Suomeksi ja valmistajalla on kaikki oikeudet muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. Mitään osaa ei saa kopioida tai käyttää eikä kääntää ilman kirjallista suostumusta. Pidätämme oikeuden muuttaa ja täydentää sitä ilman

ennakkoilmoitusta.

Kaikki oikeudet pidätetään.

## **ENNEN MITTAUSTEN ALOITUSTA**

### **Mittarista ja testiliuskoista**

- Lue ja noudata huolellisesti käyttöohjeen ja pakkauksen ohjelehdien ohjeita testiliuskoista ja tarkistusliuoksista. On hyvin tärkeätä noudattaa ohjeita väärän tuloksen tai väärän hoidon estämiseksi.
- Aseta aika ja päivämäärä mittariisi ennen mittauksen aloitusta.
- Tarkasta testiliuskapakkaus ennen niiden ensimmäistä käyttöä. Jos näet vaurion pakkauksen kannessa tai jos jokin estää

kantta sulkeutumasta kunnolla, älä käytä testiliuskoja. Ota yhteys Asiakaspalvelukeskukseen. Vaurioituneet testiliuskat voivat aiheuttaa epätarkkoja tuloksia, jotka voivat johtaa väärään hoitoon.

### **Uudesta mittaristasi**

- Uusi mittarisi on suunniteltu ja sitä voidaan käyttää kokoverinäytteiden mittauksiin. Sitä ei pitäisi käyttää diabeteksen toteamiseen.
- Vaikka käytät aina verta testiliuskoissa, järjestelmäsi on kalibroitu antamaan plasma-arvoja helpompaa vertailua varten laboratoriotuloksiin.
- Mittari, testiliuskat, ja tarkistusliuokset ovat vain kehonulkoiseen käyttöön (in vitro). Älä syö testiliuskoja. Älä niele tai ota ruiskeena

tarkistusliuoksia tai käytä tarkistusliuoksia muuhun tarkoitukseen kuin järjestelmätestaukseen.



## TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

### **Itseäsi ja muiden testaaminen**

- Joillakin henkilöillä, joilla on diabetes, ei ole matalan verensokerin oireita (hypoglykemia).

Muut, kuten lapset tai henkilöt, jotka ovat tajuttomana tai joilla on tiettyjä vajavaisuuksia, eivät ehkä pysty kertomaan oireistaan hoitajilleen. Näistä syistä, älä vaihda hoitoa neuvottelematta ensin lääkärin kanssa.

- Tee koemittaus avatessasi uuden testiliuskipakkauksen tai jos luulet

testituloksesi olevan väärin. Koemittaus kertoo sinulle, toimivatko mittari ja testiliuskat kunnolla.

- Katso testiliuska- ja tarkistusliuospakkausten ohjeista lisää terveyteen liittyviä tietoja.
- On aina hyvä ajatus pitää tarkistusmenetelmä käytettävissä. Mittaushäiriö voi aiheuttaa viiveen hoitopäätöksiin ja johtaa vakavaan sairaanhoidolliseen tilaan. Esimerkkeinä tarkistusmenetelmistä ovat varamittari tai laboratoriotesti. Kysy lääkäriltäsi tai apteekkarilta muita mahdollisia tarkistusmenetelmiä.

Jos sinun verensokeritulokset eivät vastaa tuntemuksiasi ja olet noudattanut tämän käyttöohjeen ohjeita, noudata lääkärisi

ohjeita, tai soita lääkärillesi.

Erityistiedot terveydenhuollon tarjoajille ja hoitajille

- Älä käytä tätä laitetta verensokerimittaukseen henkilöillä, jotka kärsivät sydänkohtauksesta (vakava kohtaus) tai vähentyneestä ääreisverenkierrosta.
- Neuvottele lääkärisi kanssa määrittääksesi onko tarkoituksenmukaista opettaa lapsellesi mittarijärjestelmän tai joidenkin muiden lääkintätuotteiden käyttöä.

## **ENNEN MITTAUSTA**

1. Vältä syömistä, alkoholin juomista, tupakointia, kuntoilua ja kylpemistä 30 minuuttia ennen mittausta.

Lepää vähintään 15 minuuttia ennen mittausta.

2. Mittaukset tulee suorittaa hiljaisessa paikassa.

3. Ole liikkumatta ja älä puhu mittauksen aikana.

# TUNNE LAITTEESI

## Pääyksikkö



Testiliuska-aukko



Tiedonsiirtojohto

Näyteikkuna



Kosketuselektrodiliuska



Syvyyssilmäisin

Syvyyssvalintakiekkko

Laukaisupainike

Takaosa

# LANSETTIKYNÄN KÄYTTÖ


## Lansettirummun asentaminen

Sinun täytyy ensin ladata rumpu

lansettikynään saadaksesi sen

käyttövalmiiksi.

1. Riko lansettipään suojus.

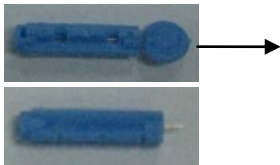

2. Irrota lansettikynän kärkiosa ja sitten työnnä uusi rumpu sisään, kunnes se pysähtyy. Se napsahtaa paikalleen. Sitten ruuvaa kärkiosa takaisin.



3. Olet nyt valmis käyttämään ensimmäistä lansettia.

Syvyysvalintakiekko on asennossa numero 3, tarkoittaen, että kolme uutta lansettia on jäljellä.

## **Lansettikynään valmistelu**

### **sormenpäätestiä varten**

Käytä uutta lansettia jokaiseen sormenpistoon välttääksesi tulehduksen ja saadaksesi kivuttoman testin.


1. Varmistu, että kärkiosa on kireällä.
2. Säädä syvyys kääntämällä valintakiekkoa. Syvyysvalintakiekon ilmaisin osoittaa tämänhetkisen syvyysvalinnan. Mitä suurempi numero, sitä syvempi pisto. Jos sinulla on pehmeä iho, ehdotamme aloittamista syvyydellä 1. Jos ihosi on karkeampi, kokeile suurempaa asetusta.

3. Vedä takaosaa, kunnes nuppi jää ylös.



## MITTAAMINEN

1. Kytke eB-G -laitteen johto puhelimeen (B820). Puhelimen näyttö näyttää oikealla osoitetun kuvan.

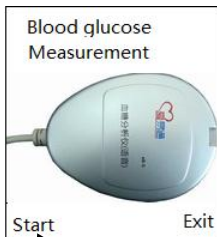

Pleffasef insert  
test paper



2. Paina **Alku**  
puhelimessa.

Näyttöön tulee:

Blood glucose Measurement	Verensokerin mittaus
Start	Alku
Exit	Poistu
Pleffasef insert test paper	Laita paikoilleen testipaperi

**Verensokeritestin tekeminen  
sormenpästäsi otetulla verellä**

Ennen kuin teet ensimmäisen

verensokeritestin,  
tarvitset mittarin,  
testiliuskan ja  
lansettikynän, jossa on  
ladattu rumpu veritestin tekemiseksi.



(1). Pese kätesi lämpimällä saippuavedellä ja  
kuivata perusteellisesti. Likaiset tai märät  
kädet voivat vaikuttaa tuloksiin.

(2). Valmistele lansettikynä.

(3). Asenna testiliuska mittariin nuolen  
suuntaan. Mittari  
käynnistyy.

(4). Puhelimessa on  
oikealla osoitettu  
kuva.



(5). Pidä lansettikynä tukevasti sormenpäästäsi vasten.

Muista, että aukko, josta lansetti tulee ulos ei ole



kärkiosan keskellä. Paina laukaisupainiketta.


Varmistu, että kukin lansetti palautuu täysin käytön jälkeen.

Collect blood	Ota verta
---------------	-----------

(6). Purista sormeasi kevyesti auttaaksesi verivirtausta. Tämä auttaa veritipan saamista. Kosketa testiliuskan päässä olevalla näyteikkunalla veritippaa. Älä pane verta testiliuskan päälle.



3. Jos laskenta ei käynnisty, se tarkoittaa, ettei testiliuskassa ole riittävästi verta. Odota 5 sekuntia ja tulos saadaan näkyviin. Jos laskenta ei käynnisty, voit joutua ottamaan enemmän verta viiden sekunnin aikana.

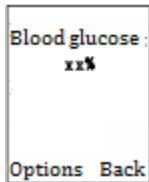

4. Mittauksen lopettaminen.

Valitse **Vaihtoehdot** tallettaaksesi tai lähettääksesi mitatut arvot. Valitse **Takaisin** lopettaaksesi.

Blood glucose	Verensokeri:
Options	Vaihtoehdot
Back	Takaisin

**Muistin käyttö**

**Tallettaaksesi:** ---- napsauta **Vaihtoehdot**, valitse **Tallenna**.

**Lähettääksesi:** ---- napsauta **Vaihtoehdot**, valitse **Lähetä**.

**Lähettääksesi ja tallettaaksesi:** ---- napsauta **Vaihtoehdot**, valitse **Lähetä ja tallenna**.

## HOITO JA YLLÄPITO

Pitääksesi verensokerimittarisi parhaassa mahdollisessa kunnossa toimi seuraavan ohjeen mukaisesti:

- Puhdista suppilo pehmeällä kuivalla kankaalla tai vanupuikolla.
- Älä altista laitetta liian kuumalle, kosteudelle, pölylle tai suoralle auringonvalolle.

## VIANETSINTÄ

<b>Mahdollinen syy</b>	<b>Ratkaisu</b>
Laitetta ei havaittu.	Aseta pistoke

	huolellisesti paikoilleen.
Veren ottamisen jälkeen laskenta ei käynnisty.	Ota enemmän verta viiden sekunnin aikana.

## TAKUUTIEDOT

Sinun



automaattiselle

verensokerimittarillesi myönnetään takuu

materiaali- ja valmistusvirheiden varalta, jotka

ilmenevät 5 vuoden kuluessa ostopäivästä kun sitä

on käytetty laitteen mukana toimitetun

käyttöohjeen mukaisesti. Yllä mainitut takuut

koskevat vain alkuperäistä vähittäisostajaa.

Korjaaminen tai vaihtaminen on ainoa vastuumme ja sinun parannuskeino yllä mainituilla takuilla.

Liitä mukaan ostotosite. Liitä mukaan kirje, jossa on nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja kuvaus kyseisestä ongelmasta. Pakkaa tuote huolellisesti kuljetusvahingon estämiseksi. Mahdollisen katoamisen takia kuljetuksessa, suosittelemme vakuuttamaan tuotteen vaaditulla palautustositteella.

**KAIKKI VÄLILLISET TAKUUT, MUKAAN  
LUKIEN MUTTA EI YKSINOMAAN  
MYYNTIKELPOISUUDEN JA TIETTYÄ  
TARKOITUSTA VARTEN  
SOVELTUVUUDEN LIITTYVÄT TAKUUT,  
RAJOITTUVAT YLLÄ OLEVAN**

## **SOVELTUVAN KIRJALLISEN TAKUUN**

**KESTOON.** Jotkin valtiot eivät salli rajoituksia tarkoitetun takuun keston, joten yllämainittu rajoitus ei tarvitse koskea sinua.



**EI VASTAA KÄYTÖN**

**VAHINGOISTA TAI MUISTA**

**SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ TAI**

**EPÄSUORISTA KULUISTA,**

**KUSTANNUKSISTA TAI VAHINGOISTA.**

Jotkin valtiot eivät salli satunnaisten tai epäsuorien vahinkojen poikkeusta tai rajoitusta, joten yllämainitut poikkeukset eivät tarvitse koskea sinua.

Tämä takuu antaa sinulle erityisiä

lainvoimaisia oikeuksia, ja sinulla voi olla muita oikeuksia, jotka voivat vaihdella valtiosta toiseen.

## **TEKNISET TIEDOT**

Nimi: verensokerimittari

Tyyppi: eB-G

Muisti: 100 mittausta päiväys- ja aikatietoineen

Virtalähde: puhelin

Käyttöilmanpaine: 700...1060 hPa

Ympäröivä käyttölämpötila: 8...40 °C

Ympäröivä käyttökosteus:  $\leq 80$  %

Laitteen paino: noin 50 g

Mitat: leveys 59 mm  $\times$  korkeus 80 mm  $\times$   
paksuus 24 mm

Varusteet: käyttöohje, sertifikaatti

- ※ Valmistaja voi muuttaa teknisiä tietoja tai ulkomuotoa ilman ennakkoilmoitusta.